

pH-neutral Fosfatbuffrad 4,2%

NYHET!



pH-neutral används för akut sköljning av ögon och hud för att minska risken för allvarliga skador orsakade av syra, bas eller partikelkontaminering.

ANVISNINGAR

- Späd inte lösningen och återanvänd inte flaskan
- För att öppna: vrid korken i pilens riktning
- Placera det integrerade ögonmunstycket mot det drabbade området
- Kontrollera flödet genom att trycka på flaskan
- Skölj det drabbade området efter behov
- Skölj i maximalt **2 minuter!**
- Fortsätt skölja med vatten om det behövs
- Sök medicinsk vård

Art. nr: pH-neutral



Phosphate Buffer Solution



Active: Purified water 95.1%.
Inactive: Sodium dihydrogen phosphate, dibasic sodium phosphate.

250ml



STERILE R



5°C ^{35°C}

MD
Medical Device



AlphraMedic

www.alphramedic.se